


Stap 1: Start

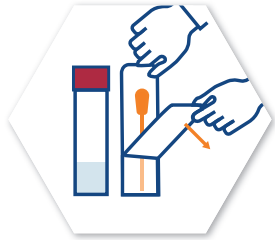

- Open de verpakking.
- Haal het wattenstokje en het buisje er uit.
- **Belangrijk!** De locatie van afname (wond, keel of vagina) is afhankelijk van het advies van de arts. Het wattenstokje is te gebruiken voor één van de afnames bij de volgende stap.

Stap 2a: Afname - Wondkweek



- Maak de wond schoon met fysiologisch zout.
- Neem een kweek af door wattenstokje over de bodem van de wond te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b.

of

Stap 2a: Afname - Keelkweek



- Neem met het wattenstokje een keeluitstrijk af.
- Steek het wattenstokje zo diep mogelijk achter in de keel en draai deze terwijl er van links naar rechts over de achterwand van de keel gestreken wordt.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b.


of

Stap 2a: Afname - Vagina



- Neem een vaginawek af door het wattenstokje ongeveer 5 cm in de vagina te brengen.
- Draai het wattenstokje langs de vaginawand.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b.

Stap 2b: Afname

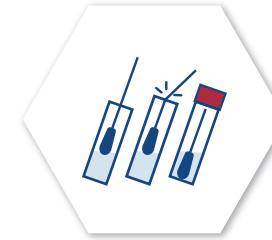

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

Stap 3: Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en *herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijgevoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.


Stap 4: Verzendklaar maken en verzenden



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

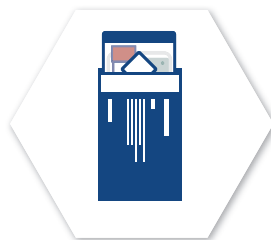

- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.