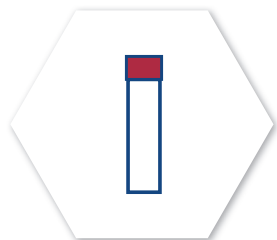
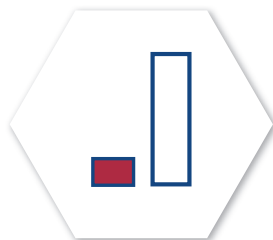


**Stap 1:  
Start**


- Gebruik voor deze afname de steriele container.
- Deze container is geschikt voor bijvoorbeeld sputum en punctaten.

**Stap 2:  
Afname**


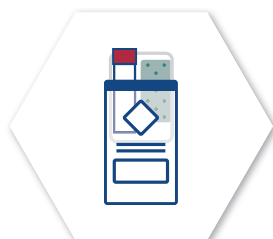
- Doe het materiaal in de container.

**Stap 3:  
Identificatie afnamemateriaal**


- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en \*herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijgevoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de container.

**Stap 4:  
Verzendklaar maken en verzenden**


- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de container met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.