

Stap 1: Start




- Haal de kweekset uit de verpakking.
- Ontdop de buis met het afnamemedium.

Stap 2: Afname - Rectumuitstrijk



- Steek de wattenstok voorzichtig in de anus (zoals een koortsthermometer), haal deze er uit en controleer of er wat ontlasting op wattenstok zit.
- Lukt dit niet, steek dan de wattenstok in een beetje ontlasting.

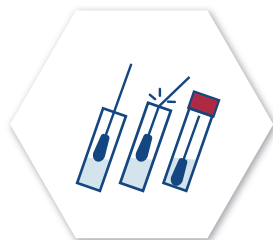

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

Stap 3: Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en *herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

Stap 4: Verzendklaar maken en verzenden



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.