




Stap 1 Start



- Gebruik voor deze afname de steriele container.

Stap 2 Afname

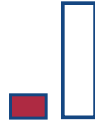

- Reinig de nagel met alcohol 70%.
- Verwijder het aangetaste nageldeel zodanig dat materiaal van de grens met het gezonde nageldeel wordt afgenomen: maak inkepingen in de nagel en knip het aangetaste nageldeel uit. Als dit niet mogelijk is, schraap dan materiaal van de onderzijde van de nagel.
- Doe het materiaal in de container en sluit deze goed af.

Stap 3 Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de container.

Stap 4a Aanvraagformulier



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

Stap 4b Verzendklaar maken



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

Stap 4c Verzenden



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.