




Stap 1 Start

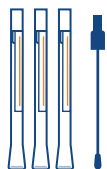

- Voor dit onderzoek zijn minimaal 3 afnames nodig.
- Let op! Gebruik voor iedere afname (neus, keel of perineum) een nieuwe verpakking. Een wattenstok mag maar voor één afname gebruikt worden.
- Doorloop voor iedere afname stap 2 (a,b of c), stap 3 en stap 4.
- Was de handen met water en zeep vóór afname.

Stap 2a Afname - Neuskweek



- Open de eerste verpakking door het wattenstokje in te brengen in de neus en langs de binnenzijde van beide neusvleugels te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 3 en 4.

Stap 2b Afname: -Keelkweek




- Open de tweede verpakking.
- Ga met het uiteinde van het wattenstokje langs de twee bogen (direct naast de huid).
- Ga voor deze afname verder naar stap 3 en 4.

Stap 2c Afname - Perineum



- Open de derde verpakking.
- Neem een perineumkweek af door met het wattenstokje rondom de anus te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 3 en 4.

Stap 3 Afname

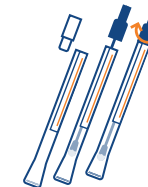

- Verwijder de dop van de buis.
- Steek het wattenstokje met de blauwe dop in de buis tot blauwe dop sluit op de buis. Draai de dop goed vast.
- Gooi de witte dop weg.

Stap 4 Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en herkomst van het lichaamsmateriaal in op het etiket op de buis.

Stap 5a Aanvraagformulier



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

Stap 5b Verzendklaar maken



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

Stap 5c Verzenden



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.

Belangrijk Let op

Bij wonden/ huidafwijkingen en urinecatheter ook een MRSA kweek afnemen van deze afnamelocaties. Neem voor iedere extra afname een nieuwe swab.