




Stap 1 Start

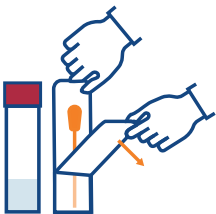


- Open de verpakking.
- Haal het wattenstokje en het buisje er uit.

Stap 2a Afname



- Desinfecteer voor het afnemen de handen en draag handschoenen tijdens de afname.
- Trek voorzichtig het onderste ooglid naar beneden en strijk van binnen naar buiten over de conjunctiva (overgang tussen oog en oog lid).
- Noteer de afnamelocatie, wanneer er van beide ogen een uitstrijk afgenomen wordt.

Stap 2b Breek het stokje

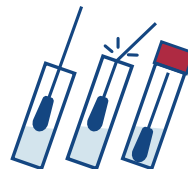

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

Stap 3 Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en *herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijgevoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de buis.

Stap 4a Aanvraagformulier



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

Stap 4b Verzendklaar maken



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

Stap 4c Verzenden



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvelop.