


Stap 1: Start

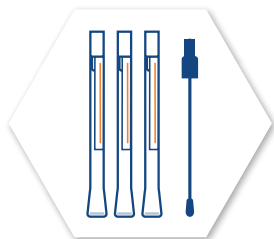

- Voor dit onderzoek zijn minimaal 3 afnames nodig.
- Let op! Gebruik voor iedere afname (neus, keel of perineum) een nieuwe verpakking. Een wattenstok mag maar voor één afname gebruikt worden.
- Doorloop voor iedere afname stap 2 (a,b of c), stap 3 en stap 4.
- Was de handen met water en zeep vóór afname.

Stap 2a: Afname - Neuskweek



- Open de eerste verpakking door het wattenstokje in te brengen in de neus en langs de binnenzijde van beide neusvleugels te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 3 en 4.

Stap 2b: Afname - Keelweek




- Open de tweede verpakking.
- Ga met het uiteinde van het wattenstokje langs de twee bogen (direct naast de huid).
- Ga voor deze afname verder naar stap 3 en 4.

Stap 2c: Afname - Perineum



- Open de derde verpakking.
- Neem een perineumkweek af door met het wattenstokje rondom de anus te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 3 en 4.

Stap 3: Afname

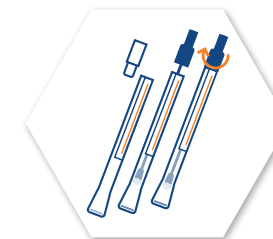

- Verwijder de dop van de buis.
- Steek het wattenstokje met de blauwe dop in de buis tot blauwe dop sluit op de buis. Draai de dop goed vast.
- Gooi de witte dop weg.

Stap 4: Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en herkomst van het lichaamsmateriaal in op het etiket op de buis.

Stap 5: Verzendklaar maken en verzenden



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

Bij wonden/huidafwijkingen en urinecatheter ook een MRSA kweek afnemen van deze afnamelocaties. Neem voor iedere extra afname een nieuwe swab.

Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.

Alrijne Leiden

- Route 32 Klinische Chemie
- Route 92 Medische Microbiologie

Alrijne Alphen

- Route 32 Klinische Chemie

Alrijne Leiderdorp

- Route 190 Klinische Chemie