




Stap 1 Afname



- Neem materiaal af uit de nasofarynx met behulp van de flexibele eswab.
- Breng de swab over de neusbodem tot in de nasopharynx en draai die voorzichtig om zijn as.

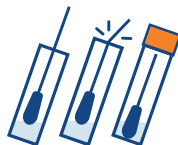

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

Stap 2 Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en herkomst van het lichaamsmateriaal in op het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de buis.

Stap 3 Transport



- Plaats de afnamebuis in de safetybag. Sluit deze door de plakstrip te verwijderen.

Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.

Leiden

- Route 32 bloedafname
- Route 92 medische microbiologie (alleen medewerkers)

Alphen

- Route 32
Klinische Chemie

Leiderdorp

- Route 144
Klinische Chemie