




## Stap 1a Afname - Wondkweek



- Maak de wond schoon met fysiologisch zout.
- Neem een kweek af door wattenstokje over de bodem van de wond te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 1b.

## Stap 1a Afname - Keelkweek

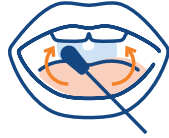


- Neem met de swab een keeluitstrijk af.
- Steek de swab zo diep mogelijk achter in de keel en draai de wattenstok terwijl er van links naar rechts over de achterwand van de keel gestreken wordt.
- Ga voor deze afname verder naar stap 1b.

## Stap 1a Afname - Vagina



- Neem een vaginawEEK af door het wattenstokje ongeveer 5 cm in de vagina te brengen.
- Draai het wattenstokje langs de vaginawand.
- Ga voor deze afname verder naar stap 1b.

## Stap 1b Afname

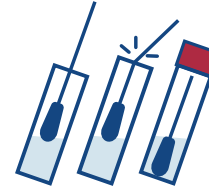

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

## Stap 2 Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

## Stap 3 Transport



- Plaats de afnamebuis in een safetybag. Sluit deze door de plakstrip te verwijderen.

**Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.**

### Leiden

- Route 32 bloedafname
- Route 92 medische microbiologie (alleen medewerkers)

### Alphen

- Route 32  
Klinische Chemie

### Leiderdorp

- Route 144  
Klinische Chemie