




Stap 1
Start



- Gebruik voor deze afname de steriele container.
- Deze container is geschikt voor bijvoorbeeld sputum en punctaten.

Stap 2
Afname

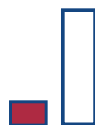

- Doe het materiaal in de container.

Stap 3
Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en herkomst van het lichaamsmateriaal in op het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

Stap 4
Transport



- Plaats de afnamebuis in een safetybag. Sluit deze door de plakstrip te verwijderen.

Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.

Leiden

- Route 32 bloedafname
- Route 92 medische microbiologie (alleen medewerkers)

Alphen

- Route 32
Klinische Chemie

Leiderdorp

- Route 144
Klinische Chemie